

Hinweise für DIPAX Produkte zusammen mit Windows® Vista / 7

Betrifft folgende DIPAX Produkte:

- ClickMaster
- ControlBox
- MultiBox
- JoystickMouse

Die neuen Sicherheitsfunktionen von Windows® Vista / 7 erzeugen bei zahlreichen Anwendungen für behinderte Menschen Probleme.

So ist es bei eingeschalteter Benutzerkontensteuerung nicht mehr ohne weiteres möglich, uneingeschränkt Mausclicks oder Mauszeigerbewegungen per Software auszulösen. Das betrifft vor allen Dingen systemeigene Sicherheitsabfragen wie z.B. „Möchten Sie dieses Programm wirklich öffnen“ usw.

Bekanntere Probleme gibt es deshalb auch bei der Standard-Bildschirmtastatur des Betriebssystems. Diese reagiert ebenfalls teilweise nicht mehr auf Softwareclicks.

Es gibt nach jetzigem Erkenntnisstand nur zwei Lösungen für dieses Problem:

1. Die Eingabehilfe immer als Administrator ausführen

Dazu gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Rechtsklick auf die Verknüpfung der entsprechenden DIPAX Anwendung (z.B. ClickMaster)
2. Im jetzt angezeigten Kontextmenü wählen Sie „Eigenschaften“
3. Klicken Sie auf den Reiter „Kompatibilität“
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen für alle Benutzer ändern“
5. Setzen Sie ein Häkchen bei „Programm als Administrator ausführen“

Wenn die Einstellungen erfolgreich waren, wird die Anwendung ab sofort immer als Administrator ausgeführt. Mausclicks und Mausbewegungen sollten jetzt problemlos funktionieren.

2, Die Benutzerkontensteuerung ausschalten

Die Benutzerkontensteuerung verhindert, dass Programme unkontrolliert Schaden anrichten. Das wird beispielsweise auch dadurch erreicht, dass per Software ausgelöste Mausclicks einfach blockiert werden. Diese Einschränkung betrifft aber auch Programme wie ClickMaster, MultiBox usw.

Bei Problemen kann die Benutzerkontensteuerung von Windows® Vista / 7 ggf. deaktiviert werden. Das kann unter Systemsteuerung -> Benutzerverwaltung -> Benutzerkontensteuerung eingestellt werden (siehe Screenshot am Beispiel von Vista).

